



FROGGYMOUTH

PROTOKOL ZA KORIŠTENJE
FROGGYMOUTH pomagala



FROGGYMOUTH

FROGGYMOUTH je funkcionalno pomagalo koje funkcionira drugačije od pomagala dostupnih na tržištu. Temelji se na fiziološkim procesima koja generiraju biokemijske modifikacije otkrivene nedavnim istraživanjima u neuroznanosti, što znači da je pomagalo

potrebno koristiti 15 minuta dnevno. To je velika promjena u procesu učenja. Međutim, važno je pažljivo slijediti predloženi protokol kako **bi se osigurala veća učinkovitost u postizanju ciljeva.**

Korak 1:

NAMJEŠTANJE POMAGALA

Nemojte klijentu davati previše uputa prilikom namještanja pomagala, osim da pokuša gutati slinu dok gleda televiziju 15 minuta dnevno, tako da je pažnja u potpunosti usmjerena na ekran i da su pogled i jezik u horizontalnoj ravni. Knjige i tableti nisu prikladni jer je veća vjerojatnost da će curiti slina kada je glava nagnuta.

O uputama za nošenje FROGGYMOUTH pomagala odlučuje terapeut ovisno o napretku tretmana (veliki, netretiran prednji otvoren zagriz će spriječiti željene rezultate). FROGGYMOUTH se može koristiti od početka kada se tretiraju manja odstupanja. Međutim, nužno je osigurati da jezik može naći fiziološku poziciju koja je prisutna kod urednog zagriz.

FROGGYMOUTH se također može koristiti u zadnjoj fazi tretmana kako bi se osigurala stabilnost postignutih rezultata.

Prije uključjenja u tretman osteopata i logopeda, ponekad će biti potreban ortodontski pregled, ako je na primjer prisutan pretjerano otvoren zagriz.





Korak 2: **ZAPAMĆIVANJE NOVOG ISKUSTVA**

Što promatrati, što reći?

Pitajte dijete slini li još uvijek prilikom nošenja pomagala ili je problem nestao. Potreban je najmanje jedan tjedan za vrlo čest odgovor: "U početku sam slinio, ali više se to ne događa."

U tom slučaju objasnite roditeljima da djeca, kao kompjuteri, imaju dva programa kojima kontroliraju salivaciju.

Da bi se izabrao pravi program, potrebno je kliknuti na ispravnu ikonu na kompjuterskom desktop. Stisnute usne vode ka starom programu, dok zatvoreni zubi i opuštene usne vode ka novom programu.

Ako dijete nastavi sliniti, potrebno mu je osvijestiti da slinu gura jezikom prema naprijed i da su se usne prisiljene zatvoriti kako bi spriječile curenje sline na odjeću te da je slinu potrebno vratiti u stražnji dio usta kako bi je progutalo.

Ovaj slijed je kompliciran kada se slina nalazi u sredini jezika i može se poslati direktno u ždrijelo. Kako bi se postigao pravilan obrazac mora se koristiti mišić stiloglosus.

Ovaj mišić podiže stražnji dio jezika prema gore i nazad te istovremeno smanjuje širinu jezika, a često nije nikada bio korišten. Intraoralno zrcalo treba pritisnuti prema dolje iza lingvalne linije i reći klijentu da se odupre toj sili gurajući zrcalo prema gore.

Ponovite ovu vježbu dva ili tri puta kako biste stvorili novu motoričku sliku. Ako je pozitivan rezultat postignut tijekom drugog susreta, roditelje zamolite da obrate pažnju na položaj usana.

Djetetu je puno jednostavnije kontrolirati usne nego sedamnaest mišića jezika. Tri puta dnevno roditelji trebaju reći djetetu: "Tako je, to je točno" i "Pazi, usne su ti stisnute." To će biti puno učinkovitije nego trošiti vrijeme na ponovno učenje ovog koraka.

Stimulirat će kortiko-kortikalne petlje u malom mozgu, koje ispravljaju naučene obrasce i utvrđuju pravilne vještine. Ovaj zadnji dio može biti program za treći susret ukoliko je potrebno malo vremena da se uključi stiloglosus.

Korak 3:

AUTOMATIZACIJA

Prije nego što dijete sjedne u stolicu provjerite opuštenost donjeg dijela lica kako biste provjerili je li djelovanje trigeminalnog živca zamijenilo djelovanje ličnog živca. Potrebna je stimulacija trigeminalnog živca, a blokiranje ličnog živca, što je suprotno onome što promiču mnogi drugi protokoli.*

Ukoliko dijete prijeđe jezikom preko/između usana tijekom konzultacija, to je indikacija da ovaj korak još nije savladan.

*Ovaj dvostruki funkcionalni zahtjev; stražnji ligvalni i okluzivni, orofacijalni terapeuti često zaboravljaju i vjerojatno je jedan od najčešćih uzroka neuspjele rehabilitacije.

Jean Delaire, 2015, preface from "From Dysfunction to Dysmorphosis in Paediatric Orthodontics. Benefits of FROGGYMOUTH"



Step 4:

NAKNADNO PRAĆENJE

Nakon što je usvojena nova vještina, pomagalo se može koristiti sve rjeđe i rjeđe. Međutim, bilo bi ga korisno nositi jednom tjedno tijekom perioda od tri mjeseca.

Pronadite edukacije za stručnjake na našem YouTube kanalu.
Imate li pitanja? Kontaktirajte nas na info@feralic.hr
Molimo vas pažljivo pročitajte upute u letku koji dolazi s medicinskim pomagalom.
FROGGYMOUTH – Medicinski uređaji klase I – CE
Biotech Dental Smilers – 305 Allées de Craonne – 13300 Salon-de-Provence, Francuska
www.feralic.hr